

Link do produktu: <https://www.azsklep.pl/neoprenowa-opaska-na-kolano-ze-stabilizacja-rzepki-p-1160.html>

Neoprenowa opaska na kolano ze stabilizacją rzepki

Cena	42,00 zł
Dostępność	Szybka Wysyłka 24H
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Jest to opaska na kolano w kolorze czarnym wykonana z neoprenu. Neopren jest materiałem powszechnie znanym ze swych właściwości utrzymywania ciepłoty ciała dzięki czemu ma znakomite działanie terapeutyczne i wspomaga krążenie. Elastyczna opaska zapewnia właściwe podtrzymanie rzepki dzięki okrągłemu wycięciu na rzepkę. Wycięcie to pomaga usunąć napięcie na i wokół rzepki.

Opaska gwarantuje także odpowiedni ucisk dzięki swojej elastyczności. Pomaga zapobiegać kolejnym urazom.

Opaska zapewnia pełną ruchomość zapewniając jednocześnie wsparcie dla rzepki a także chroniąc przed urazami.

Jest to produkt, którego można używać zarówno podczas lekkich aktywności, jak i na co dzień w przypadku problemów ze stawem kolanowym jak naciągnięcia, zwichnięcia, urazy czy artretyzm.

Jest to produkt marki Tru-Fit™, która znana jest z produkcji produktów z kategorii medycyny sportowej. Marka znana jest z tego, że zapewnia optymalne wsparcie dla stawów przy jednoczesnym doskonałym dopasowaniu i komforcie użytkowania swoich produktów.

Produkty Tru-Fit™ są licencjonowane przez NASCAR®.

Opaska na kolano dostępna jest w jednym rozmiarze MD (pasuje na kolano o obwodzie 37,5 - 40,6 cm).

Pomiaru obwodu kolana należy dokonywać w pozycji stojącej pośrodku rzepki.

Cechy opaski na kolano:

- wykonana z neoprenu
- nie zawiera lateksu
- długość z przodu opaski bez rozciągania - 28 cm
- długość z tyłu opaski bez rozciągania - 20 cm

- szerokość u góry opaski bez rozciągania - 16,5 cm
- szerokość u dołu opaski bez rozciągania - 13 cm
- średnica otworu na rzepkę bez rozciągania - 4,5 cm
- kolor zewnętrzny: czarny
- kolor od wewnątrz: czerwony
- rozmiar: Medium (37,5 - 40,6 cm obwodu kolana)

Instrukcja prawidłowego zakładania opaski:

1. Wsuń opaskę szerszą częścią na nogę od kostki aż do kolana.
2. Wcięcia na przodzie opaski powinno być ułożone równo wokół rzepki.
3. W trakcie użytkowania opaska może wymagać niewielkich korekt ułożenia, aby zagwarantować jej prawidłowe działanie.
4. W celu ściągnięcia opaski należy zrolować ją od góry i zsunąć aż do kostki.
5. Opaskę należy zdjąć przez kostkę u stopy.

Instrukcja pielęgnacji: Produkt należy prać ręcznie w ciepłej wodzie z delikatnym detergentem. Suszyć na powietrzu.

Do każdego zamówienia wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.