

Link do produktu: <https://www.azsklep.pl/poreczny-termometr-na-podczerwien-p-2135.html>

Poręczny termometr na podczerwień

Dostępność

BRAK TOWARU

Numer katalogowy

AZ-IM-HM-368

Opis produktu

Termometr na podczerwień kontaktowy HM-368

Przedstawiony termometr, mierzy ciepło podczerwieni wytwarzanej przez powierzchnię skóry.

Dzięki niemu, szybko, dokładnie i prosto zmierzmy temperaturę ciała po skierowaniu termometru w stronę czoła.

Uruchomić termometr poprzez jednokrotne naciśnięcie "ON/OFF". Po włączeniu na wyświetlaczu pojawi się ostatnio zapamiętany pomiar, a dioda zapali się na zielono. Termometr jest gotowy do użycia po 3 sekundach, co sygnalizuje sygnał dźwiękowy, niebieska dioda oraz migający znak stopni Celsjusza. Przyłożyć czujnik pomiaru na 1 sekundę do czoła i wykonać pomiar, o którego zakończeniu poinformuje sygnał dźwiękowy. Pomiar pojawi się na wyświetlaczu. Po 30 sekundach od pomiaru urządzenie wyłączy się automatycznie, w przypadku, gdy nie będzie używany. Można również wyłączyć termometr przez przytrzymanie przycisku "ON/OFF". Po użyciu termometru czujnik należy przetrzeć patyczkiem z bawełnianą końcówką lub gazikiem nasączonym alkoholem, a następnie osuszyć suchym gazikiem.

Cechy produktu:

- pomiar temperatury ciała na czole
- wygodny
- wyświetlacz LCD z podświetleniem
- higieniczny
- bezpieczny
- ekonomiczny
- możliwość cichego pomiaru (nie budząc dziecka)

Dane techniczne:

- rozmiar (dł. x szer. x wys.): 47,5x23,5x25mm,
- waga (z baterią): ~22g,
- wyświetlacz LCD: 26x13mm,
- zakres pomiaru: 32-42,9 stopni Celsjusza
- pamięć: 20 pomiarów
- zasilanie: DC 3V (1 szt. baterii CR2032)
- żywotność baterii: ok. 1200 pomiarów
- pamięć: 20 pomiarów
- automatyczne wyłączenie po około 30s,
- żywotność urządzenia: 5 lat (nie wliczając baterii).

Do każdego zamówienia wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.