

Link do produktu: <https://www.azsklep.pl/sensor-cgm-anytime-ct3-14-dni-p-2716.html>

Transmitter



Cena	165,00 zł
Dostępność	Szybka Wysyłka 24H
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6971141200571

Opis produktu

Transmitter

Używanie systemu CGM, powinno być oparte o wytyczne dot. leczenia od lekarza prowadzącego. System CGM Anytime CT3 jest dokładnym, wiarygodnym i bezpiecznym urządzeniem pozwalającym na ciągłe monitorowanie glikemii u Pacjentów z cukrzycą.

Transmitter jest elementem systemu CGM Anytime CT3. Transmitter jest wielokrotnego użytku, okres jego użytkowania to aż 2 lata. Automatycznie, co 3 minuty, przesyła dane dotyczące poziomu glukozy do bezpłatnej aplikacji na smartfonie. Niezbędną częścią systemu CGM Anytime CT3, oprócz sensora i transmitera, jest bezpłatna aplikacja AnytimeWell. Umożliwia ona odczytywanie i analizowanie wyników glikemii na smartfonie. Użytkownik powinien upewnić się, czy jego smartfon spełnia wymagania środowiska operacyjnego dla Android lub iOS. Dane dotyczące poziomów glikemii przesyłane są przez transmitter systemu CGM Anytime CT3 automatycznie do aplikacji AnytimeWell na smartfon, co 3 minuty, co daje 480 odczytów dziennie

Okres przydatności transmitera systemu CGM Anytime CT3 to 2 lata. W tym okresie należy przechowywać go w temperaturze od -15°C do 45°C, przy ciśnieniu 700-1060 hPa, w nienasłonecznionym i suchym miejscu (przy wilgotności względnej < 93%).

Gdy transmitter nie jest używany, należy umieścić go w etui z ładowarką i ładować co pół roku jako czynność konserwacyjną.

Dane w transmitterze systemu CGM Anytime CT3 są przechowywane przez okres 14 dni noszenia.

W aplikacji AnytimeWell dane są przechowywane, aż do momentu usunięcia ich.

Po 14 dniach monitorowania system CGM Anytime CT3 zostanie automatycznie zatrzymany. Sensor wraz z transmitterem należy odkleić niezwłocznie po zakończeniu pojedynczej 14- dniowej sesji mając na uwadze, że u osób z cukrzycą występuje osłabienie regeneracji naskórka i gojenia się ran. Zalecana jest zmiana miejsca aplikacji po każdej pojedynczej sesji.

Wymagane jest połączenie smartfona z systemem CGM Anytime CT3 (odległość nie większa niż 6 m pomiędzy smartfonem a systemem CGM Anytime CT3). Po włączeniu Bluetooth, aplikacja AnytimeWell automatycznie wznowi połączenie. Po ponownym połączeniu dane zostaną przesłane do aplikacji AnytimeWell na smartfonie bez utraty danych.

Aplikację AnytimeWell możesz pobrać bezpłatnie

<https://www.cgmggenexo.pl/anytime/aplikacje/aplikacja-anytime-well/>

Aplikacja AnytimeWell wysyła Twoje wyniki z systemu CGM Anytime CT3 bezpośrednio do bezpiecznej chmury, dzięki czemu Twój Bliscy i Profesjoniści mogą na bieżąco obserwować Twoje dane w aplikacji AnytimeFollow.

Aplikacja AnytimeFollow przeznaczona jest dla Rodziny, Opiekunów, Profesjonalistów, którzy chcą obserwować Twoje dane z systemu CGM Anytime CT3.

Dzięki danym zgromadzonym w bezpiecznej chmurze Twój Bliscy mogą śledzić i analizować Twoje wyniki glikemii w czasie rzeczywistym. Możesz zaprosić do śledzenia Twoich danych z systemu CGM Anytime CT3 aż 20 osób.

Za każdym razem, zanim zaczniemy korzystać z systemu CGM Anytime CT3, musimy naładować transponder!